

OKIN

Designed and Engineered
in Switzerland

KNEE BRACE ONE

Knieschiene mit Extensions- und Flexionsbeschränkung



Hersteller
OKIN AG
Poststrasse 3
6060 Sarnen
mail@okin.ch



EU-Rep
Axxos GmbH
Friedrich-Wöhler-Str. 8
D-78576 Emmingen-Liptingen
eu_rep@axxos-medical.de



Das Produkt trägt ein CE-Zeichen.
Dieses Produkt ist bei der Swissmedic registriert.
Dieses Produkt ist bei der EUDAMED registriert.

Gebrauchsanleitung

- 1** Öffnen Sie die Knieschiene, die vier Gurten sowie den darunterliegenden Klett. Legen Sie die Knieschiene auf eine stabile Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass die Innenseite der Schiene nach oben zeigt und die Schiene korrekt ausgerichtet ist.
- 2** Positionieren Sie Ihr verletztes Bein so, dass die runde Aussparung auf der Rückseite auf der Kniehöhe zu liegen kommt. Die Knieschiene schliesst nach vorne hin.
- 3** Schliessen Sie die Klett-Verschlüsse und anschliessend die vier Gurten. Ziehen Sie die Gurten fest, so dass die Schiene richtig sitzt. Bei Bedarf können die hinteren Gurten angepasst werden.
- 4** Überprüfen Sie, dass die Schiene korrekt und sicher sitzt. Achten Sie darauf, dass die Schiene nicht zu fest angezogen ist, da Druckstellen entstehen können oder die Durchblutung beeinträchtigt wird.
- 5** Öffnen Sie die Klappen der seitlichen Gelenke. Dazu stossen Sie die orange Falle in Richtung Pfeil und heben die Klappe an. Stellen Sie die gewünschten Positionen der Flexions- und Extensionslimitierung ein und schliessen Sie die Klappe wieder. Überprüfen Sie, dass die Verschlussklappe korrekt geschlossen ist.

Grössentabelle

Artikelnummer	Grösse	Seite	Oberschenkelumfang
7640132380088	XS	Universal	31-38 cm
7640132380095	S	Universal	38-45 cm
7640132380101	M	Universal	45-53 cm
7640132380118	L	Universal	53-60 cm
7640132380125	XL	Universal	60-67 cm
7640132380132	XXL	Universal	67-75 cm
7640132380149	XXXL	Universal	75-83 cm

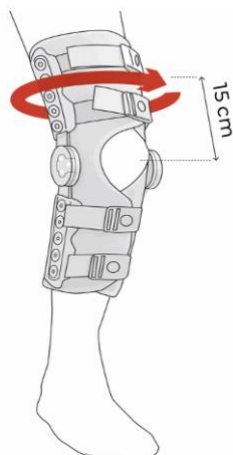


Abbildung 1. Zum Bestimmen der zu verwendenden Grösse wird der Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Kniegelenkmitte gemessen.

Beschreibung

Knieorthese zur Stabilisierung, Führung und Ruhigstellung des Knies aufgrund des 4-Punkte-Stabilisierungs-Prinzip und seitlichen Führungsschienen mit polyzentralen Gelenken zur Limitierung der Extension und Flexion.

Zweckbestimmung

Orthese zur post- und präoperativen sowie konservativen und posttraumatischen Stabilisierung, Entlastung und Ruhigstellung von Gelenken und Gliedmassen.

Indikationen

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Bandinstabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Stabilisierung und Unterstützung bei Eingriffen am Knie oder chronischen Reizzuständen.

Kontraindikationen

Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperformen des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- oder Durchblutungsstörungen der Versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe allergisch sind.

Wichtige Hinweise

Dieses Produkt ist für die Verwendung an ausschliesslich einem Patienten bestimmt. Dieses Produkt ist durch Fachpersonal oder unter Anleitung von Fachpersonal zu verwenden.

Dieses Produkt darf nicht über offenen Wunden getragen werden. Sollte es im Zusammenhang mit dem Tragen dieses Produktes zu Schmerzen kommen oder ein unangenehmes Gefühl auftreten, muss umgehend ein Arzt oder Fachpersonal konsultiert werden.

Materialzusammensetzung

Polyester (PES), Polyurethan (PUR) Schaumstoff, Nylon, Silikon

Pflegehinweise

Schonwaschgang 30 Grad. Lufttrocknen und kein Weichspülmittel verwenden. Zum Waschen seitliche Aluschienen entfernen.



Lagerungshinweis

Das Produkt ist trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern.

HVB 23.XX.XX.xxxx

MiGel Abbildung 22.04.02.00.1