

OKIN

Designed and Engineered
in Switzerland

SHOULDER BRACE 15°

Schulterabduktionskissen 15°



Hersteller

OKIN AG

Poststrasse 3

6060 Sarnen

mail@okin.ch



EU-Rep

Axxos GmbH

Friedrich-Wöhler-Str. 8

D-78576 Emmingen-Liptingen

eu_rep@axxos-medical.de




Das Produkt trägt ein CE-Zeichen.

Dieses Produkt ist bei der Swissmedic registriert.

Dieses Produkt ist bei der EUDAMED registriert.

Gebrauchsanleitung

- 1** Positionieren Sie das Abduktionskissen unter die operierte oder zu behandelnde Schulter. Legen Sie den Unterarm parallel ans Kissen. Greifen und halten Sie den Massageball fest.
- 2** Führen Sie den Hüftgurt hinter dem Rücken durch und greifen Sie den Hüftgurt mit dem gesunden Arm.
- 3** Schliessen Sie den Hüftgurt mit der Schnalle an der Stirnseite des Abduktionskissens. Achten Sie dabei, dass das Kissen auf der korrekten Höhe positioniert ist.
- 4** Greifen Sie mit dem gesunden Arm/Schulter nach der Unterarmtragetasche.
- 5** Schliessen Sie die Unterarmtragetasche mit dem dafür vorgesehenen Klettverschluss und fixieren diesen auf der Oberseite des Abduktionskissens. Drücken Sie den Klett gut fest.
- 6** Greifen Sie mit dem gesunden Arm nach dem Drei-Punkte-Schultergurt. Greifen Sie das unbefestigte Ende und achten Sie darauf, dass sie das Ende zwischen den beiden mittleren Gurten greifen.
- 7** Ziehen Sie den Drei-Punkte-Schultergurt hoch und ziehen Sie über die gesunde Schulter.
- 8** Stellen Sie sicher, dass der 3-Punkte-Schultergurt korrekt über der Schulter und unter der Achsel durch positioniert ist. Stellen Sie sicher, dass die Gurten nicht verdreht sind.
- 9** Befestigen Sie den 3-Punkte-Schultergurt mit der dafür vorgesehenen Schnalle auf der Oberseite des Abduktionskissens.
- 10** Greifen und öffnen Sie die Oberarmhalterung.
- 11** Ziehen oder lockern Sie den Riemen um die Armhalterung optimal auf Ihre Unterarmlänge und Ihren Bedürfnissen einzustellen. Bei Bedarf kann dazu der Doppel-Klett verschoben werden.
- 12** Endposition.

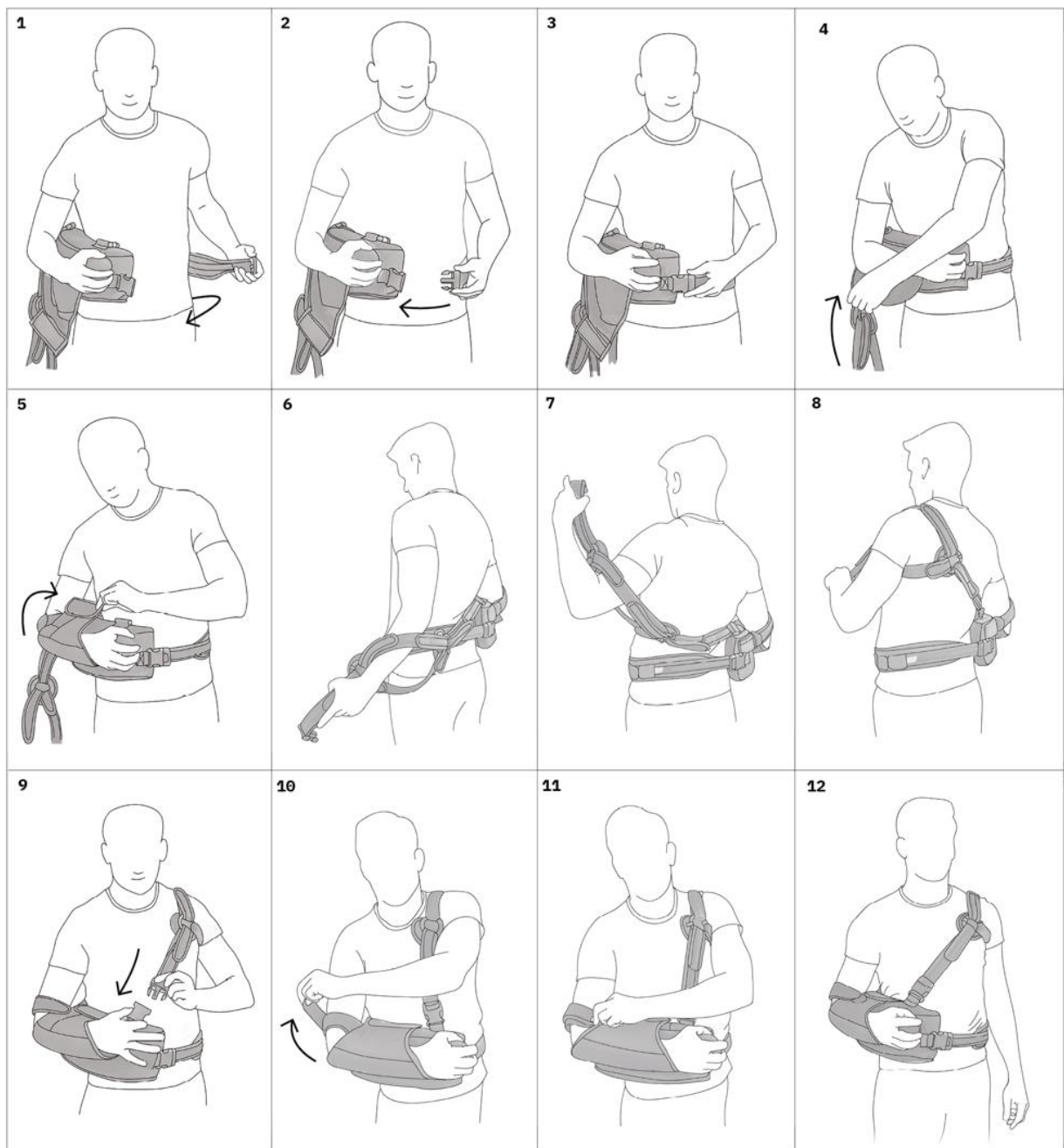

Grössentabelle

Artikelnummer	Grösse	Seite	
7640132380002	S bis XL	Universal	
7640132380293	S bis XL	Auf rechts vorbereitet	
7640132380309	S bis XL	Auf links vorbereitet	

Beschreibung

Ergonomisches Schulter-Abduktionskissen zur post- und präoperativen Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks. Die Orthese bietet einen hohen Tragkomfort, ist einfach verstell- und damit auf jeden Patienten zur korrekten klinischen Positionierung individuell anpassbar.

Zweckbestimmung

Orthese zur post- und präoperativen sowie konservativen und posttraumatischen Stabilisierung, Entlastung und Ruhigstellung von Gelenken und Gliedmassen.

Indikationen

Die Orthesen sind indiziert, wenn das entsprechende Gelenk oder die entsprechende Gliedmasse ruhiggestellt, entlastet oder stabilisiert werden soll, z.B. bei Impingementsyndrom, nach Verletzungen und Rekonstruktion der Rotatorenmanschetten oder Bizepssehne, Endoprothesenimplantat, subakromiale Defilée-Erweiterung (nach Neer), Bursitis subacromialis, Humerusfrakturen.

Kontraindikationen

Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperform des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- oder Durchblutungsstörungen der Versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe allergisch sind.

Wichtige Hinweise

Dieses Produkt ist für die Verwendung an ausschliesslich einem Patienten bestimmt. Dieses Produkt ist durch Fachpersonal oder unter Anleitung von Fachpersonal zu verwenden.

Dieses Produkt darf nicht über offenen Wunden getragen werden. Sollte es im Zusammenhang mit dem Tragen dieses Produktes zu Schmerzen kommen oder ein unangenehmes Gefühl auftreten, muss umgehend ein Arzt oder Fachpersonal konsultiert werden.

Materialzusammensetzung

Polyester (PES), Nylon, Schaumstoff (PUR)

Pflegehinweise

Schonwaschgang 30 Grad. Lufttrocknen und kein Weichspülmittel verwenden. Schaumstoffkissen zum Waschen entfernen.



Lagerungshinweis

Das Produkt ist trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern.

HVB 23.09.04.0xxx

MiGel 22.09.03.00.1